

Gebrauchsanweisung WaKi-Wasserkissen

Das WaKi-Wasserkissen dient als Wassersitzkissen der Prophylaxe und Therapie von Dekubitus Grad 1-4. Es soll zur Behandlung und Vorbeugung bei Dekubituspatienten eingesetzt werden. Bei Dekubitus im Gesäßbereich ist das Sitzen in der Regel schmerzhaft und reizt wiederum die Wunde. Beim Sitzen auf dem WaKi-Wasserkissen wird durch das Wasser der Druck auf Wunden reduziert und so dem Patienten eine Schmerzreduktion und eine bessere Wundheilung ermöglicht.

Die Patienten, die von diesen Dekubitus im Gesäßbereich betroffen sind, sind v.a. Rollstuhlpatienten, die Lähmungen aufweisen oder geriatrisch sind. Das WaKi-Wasserkissen dient als Sitzkissen um auf Rollstühlen oder auch auf allen anderen Stühlen schmerzarmes, reizarmes langes Sitzen zu ermöglichen. Das WaKi-Wasserkissen hat eine neutrale Oberseite und eine kühle Unterseite. Wird die Unterseite zum Sitzen benutzt, so kann der Patient diesen Cool-Effekt nutzen, der bei Dekubitus oft sehr angenehm ist.

Das WaKi-Wasserkissen ist abwischbar und desinfizierbar und kann somit in allen Bereichen der Pflege, Klinik, Pflegeheim oder häusliche Pflege eingesetzt werden.



Neuartiges Wirkprinzip:

Druckreduktion

... durch gleichmäßige Druckverteilung aufgrund des Wassers auf die gesamte Kontaktfläche
... durch mobiles Sitzen auf dem Wasserkissen wechselnde kurze Entlastungsphasen für das Gewebe

Schmerzreduktion

... durch maximale Druckreduktion
... durch die gespannte Folie - kein Material in der Wunde
... durch fehlende Nähte und Ventile - keine Druckspitzen

Mehrdurchblutung

... durch ständige, minimale Bewegungen des Wassers und mobiles Sitzen Massagewirkung auf das Gewebe
... durch Druckreduktion auf das Gewebe

Training und Entspannung der Rumpfmuskulatur

... durch dauernde Minibewegungen und mobiles Sitzen

Ausführung:

Farbe weiß
5 Jahre Garantie
Maße: 42 cm x 42 cm x 4 cm
auf Anfrage auch individuelle Maßanfertigung
Gewicht: 4,3 kg

Anwendung:

Wassersitzkissen für Dekubitus Grad 1-4
Prophylaxe und Therapie
auf allen Stühlen / Rollstühlen einsetzbar
bis 240 kg belastbar (TÜV geprüft)



Reinigung und Desinfizierung
mit allen Flächendesinfektionsmittel



E-Mail bei Fragen, Problemen oder Reklamationen an
info@waki-wasserkissen.de



Nicht erhitzen!
Ansonsten wird das Material beschädigt.



Keine scharfen und spitzen Ecken und Kanten!

Medizinprodukt der Klasse 1
Basis-UDI-DI: 4262431020014N
UDI-DI: 4262431020019
Ausstellungsdatum: 01.06.23

Hersteller:
Caveman Verlag UG (haftungsbeschränkt)
Hainberger Weg 12
94496 Ortenburg
info@waki-wasserkissen.de